

龍岡外科医院 御中

点検確認書

株式会社 IHIシパウラ  
環境事業部

点検担当者: 道山敏希

点検年月日	2/年 1月 29日	機種名	ONW-10	製造機番	1307
設置場所				TEL	
納入時期	2007年 10月 12日	使用回数	636	御対応者	

点検項目	点検結果			
<b>スイッチ類</b>				
電源鈕	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
フィルタリセット鈕	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
運転/停止鈕	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
アルコールモード鈕	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
<b>ランプ類</b>				
操作パネル	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
蛍光灯	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
<b>洗浄動作</b>				
フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
給水	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
細管洗浄 順方向	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
細管洗浄 逆方向	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
細管洗浄 エアパージ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
アルコールフラッシュ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
オゾン分解ファン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
排水	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
異常音、振動	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
<b>性能確認</b>				
オゾン水濃度	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	濃度: 0.4 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>		
酸欠発生	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	濃度: 2.1% 流量: 270 L/min 圧力: 0.1 ~ 0.2 MPa	
<b>水漏れ確認</b>				
装置外	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
装置内	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
<b>清掃</b>				
外装	正常	<input type="checkbox"/>	清掃	<input checked="" type="checkbox"/>
内部	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	清掃	<input type="checkbox"/>
洗浄コネクタ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
洗浄チューブ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 <input type="checkbox"/> 一式	全行経 異常あり
吸湿筒	交換 <input type="checkbox"/> 一式	
ドレン用フィルタ	交換 <input checked="" type="checkbox"/> 一個	
オゾン分解触媒	交換 <input checked="" type="checkbox"/> 一個	

福岡市博多区西春日1丁目2番16号  
医療法人 誠仁会 龍岡医院  
院長 籠田 仁 樹  
TEL 501-7535

2/年 1月 29日  
二番 徳重 義彦

\*: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗淨機 作業チェックリスト

株式会社IHIシパウラ  
環境事業部

日付: 1/21/1.21 作業者 道山敏彦  
ONW-10機番: 1307 PSA機番: SPS- 客先: 龍岡外科医院 様

定期交換部品	
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS- )	合/否
ドレン用フィルターを交換したか	合/否
排水シリコンチューブを交換したか	合/否
オゾン分解触媒を交換したか	合/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	合/否
PSA性能確認	
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	合/否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上) ( 90.1 %)	合/否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) ( 0.78 L/min)	合/否
PSA圧力の確認 ( 1.2 Mpa ) ~ ( 2.36 Mpa)	参考値
外装の取付	
オゾンセンサーは配線したか	合/否
フロントパネルのランプは配線したか	合/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合/否
ドレンチューブは接続したか	合/否
確認事項	
フタパッキンに剥がれはないか	合/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合/否
洗淨槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	合/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合/否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合/否
別紙 点検確認書に記録したか	合/否
確認試験	
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	合/否
運転は正常か、エラーはでないか	合/否
インジケータの変色は良好か	合/否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)