

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

日付: H20.11.25 作業者 井
ONW-10機番: 854 PSA機番: SPS-0301 客先: うれしの外科胃腸科7棟

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)	合/否	☒
ドレン用フィルターを交換したか	合/否	☒
排水シリコンチューブを交換したか	合/否	☒
オゾン分解触媒を交換したか	合/否	☒
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合/否	☒
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	合/否	☒
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	合/否	☒
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上) (<u>93.7</u> %)	合/否	☒
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (<u>0.82</u> L/min)	合/否	☒
PSA圧力の確認 (<u>115</u> Mpa) ~ (<u>203</u> Mpa)	参考値	
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか	合/否	☒
フロントパネルのランプは配線したか	合/否	☒
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合/否	☒
ドレンチューブは接続したか	合/否	☒
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか	合/否	☒
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合/否	☒
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	合/否	☒
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合/否	☒
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合/否	☒
別紙 点検確認書に記録したか	合/否	☒
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	合/否	☒
運転は正常か、エラーはでないか	合/否	☒
インジケータの変色は良好か	合/否	☒
不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)		

異常有、検別	正常	異常	調整	交換
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.4 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 93.7% 流量: 0.82L/min 圧力: 11.5 ~ 20.2 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐
装置内	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃 ☐	
内部	正常	☐	清掃 ☒	
洗浄コネクタ	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐

交換部品	交換	数量	コメント
吸着筒	交換 ☒	一式	定期メンテナンス交換済。 フタスプリング交換(無償)
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	

20年11月25日

署名 鐔野 二郎



※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。