

中村循環器 御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者： 佐々木才

点検年月日	H21年11月5日	機種名	ONW-10	製造機番	312
設置場所				TEL	
納入時期	H15年6月	日	使用回数		御対応者

点検項目	点検結果				
スイッチ類					
電源釦	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>			
フィルタリセット釦	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>			
運転/停止釦	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>			
アルコールモード釦	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>			
ランプ類					
操作パネル	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>			
蛍光灯	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>			
洗浄動作					
フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>	
給水	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>	
細管洗浄 順方向	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>	
細管洗浄 逆方向	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>	
細管洗浄 エアバージ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>	
アルコールフラッシュ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>	
オゾン分解ファン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>	
排水	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>	
異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>	
性能確認					
オゾン水濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	濃度： 0.4 mg/L			
オゾンインジケータ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>				
酸素発生	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	濃度： 95 % 流量： 0.8 L/min 圧力： 98 ~ 161 MPa			
水漏れ確認					
装置外	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>	
装置内	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>	
清掃					
外装	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	清掃 <input type="checkbox"/>			
内部	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	清掃 <input type="checkbox"/>			
洗浄コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>	
洗浄チューブ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>	

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 <input checked="" type="checkbox"/>	一式	
吸湿筒	交換 <input checked="" type="checkbox"/>	一式	
ドレン用フィルタ	交換 <input checked="" type="checkbox"/>	一個	
オゾン分解触媒	交換 <input checked="" type="checkbox"/>	一個	

年 月 日

ご署名



※：本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。