

稚葉村国民健康保険病院 御中

点検確認書

株式会社 IHIシパウラ
環境事業部

点検担当者：河野 敏武

点検年月日	H21 年 5 月 20 日	機種名	ONW-10	製造機番	NO. 756
設置場所				TEL	
納入時期	H17 年 2 月 日	使用回数	896	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアバージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：	0.3 mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度：93 %	流量：0.8 L/min 圧力：175 ~ 218 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式	
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	

H21 年 5 月 20 日

ご署名 稚葉睦美 ㊞

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

日付: H21年5月20日

作業者 河野 敏武

ONW-10機番:

PSA機番: SPS-

客先: 榎本国民健康保険病院様

定期交換部品	
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)	合/否
ドレン用フィルターを交換したか	☒ 合/否
排水シリコンチューブを交換したか	合/否
オゾン分解触媒を交換したか	☒ 合/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	☒ 合/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	☒ 合/否
PSA性能確認	
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	☒ 合/否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上) (<u>93</u> %)	☒ 合/否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (<u>0.8</u> L/min)	☒ 合/否
PSA圧力の確認 (<u>125</u> Mpa) ~ (<u>218</u> Mpa)	参考値
外装の取付	
オゾンセンサーは配線したか	☒ 合/否
フロントパネルのランプは配線したか	☒ 合/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	☒ 合/否
ドレンチューブは接続したか	☒ 合/否
確認事項	
フタパッキンに剥がれはないか	☒ 合/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	☒ 合/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	☒ 合/否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	☒ 合/否
別紙 点検確認書に記録したか	☒ 合/否
確認試験	
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	☒ 合/否
運転は正常か、エラーはでないか	☒ 合/否
インジケータの変色は良好か	☒ 合/否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)