

海老原 内科 御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 河野 敏武

点検年月日	1721 年 11 月 25 日	機種名	ONW-10	製造機番	700
設置場所	海老原医院	TEL	0986-64-1211	御対応者	ワテノ 様
納入時期	1716 年 5 月 日	使用回数	964		

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常 ☒	交換 ☐		
フィルタリセット釦	正常 ☒	交換 ☐		
運転/停止釦	正常 ☒	交換 ☐		
アルコールモード釦	正常 ☒	交換 ☐		
ランプ類				
操作パネル	正常 ☒	交換 ☐		
蛍光灯	正常 ☒	交換 ☐		
洗浄動作				
フタロック	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
給水	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☒	ホス交換
細管洗浄 順方向	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 逆方向	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 エアパージ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
アルコールフラッシュ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
オゾン分解ファン	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
排水	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
異常音、振動	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
性能確認				
オゾン水濃度	正常 ☒	濃度: 0.3 mg/L		
オゾンインジケータ	正常 ☒			
酸素発生	正常 ☒	濃度: 93 % 流量: 0.8 L/min 圧力: 195~105 MPa		
水漏れ確認				
装置外	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
装置内	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
清掃				
外装	正常 ☒	清掃 ☐		
内部	正常 ☒	清掃 ☐		
洗浄コネクタ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
洗浄チューブ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	すべて正常でした。 ※給水ホース交換 給水ホース取り外し中破損の部
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

宮崎県 北諸県郡 山田大字 中野集 東原3323-8
0986-64-1211

21 年 11 月 25 日

ご署名 河野 敏武



※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。