

加藤内科クリニック 御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者: 河野 敏武

点検年月日	21 年 11 月 25 日	機種名	ONW-10	製造機番	534
設置場所	加藤内科クリニック	TEL	0994-82-0162	御対応者	岡田様
納入時期	16 年 11 月 日	使用回数	870		

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.3 mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度:	93 %
			流量:	8 / L/min
			圧力:	1.89 ~ 1.02 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	すべて正常でした。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

21 年 11 月 25 日
〒899-8102
鹿児島県曽於市大隅町岩川5649番地
ご署名 加藤内科クリニック 加藤 修
TEL (0994) 82 0162

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

岡田 山子