

牛島 隆 秀

御中

# 点検確認書

株式会社 IHIシパウラ  
環境事業部

点検担当者: 藤 井

|       |             |      |        |      |      |
|-------|-------------|------|--------|------|------|
| 点検年月日 | 2019年12月23日 | 機種名  | ONW-10 | 製造機番 | 1168 |
| 設置場所  |             | 使用回数 | 441    | TEL  |      |
| 納入時期  | 19年 / 月 日   | 御対応者 |        |      |      |

| 点検項目       | 点検結果 |                                     |                                           |                          |
|------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| スイッチ類      |      |                                     |                                           |                          |
| 電源釦        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                        | <input type="checkbox"/> |
| フィルタリセット釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                        | <input type="checkbox"/> |
| 運転/停止釦     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                        | <input type="checkbox"/> |
| アルコールモード釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                        | <input type="checkbox"/> |
| ランプ類       |      |                                     |                                           |                          |
| 操作パネル      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                        | <input type="checkbox"/> |
| 蛍光灯        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                        | <input type="checkbox"/> |
| 洗浄動作       |      |                                     |                                           |                          |
| フタロック      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                        | <input type="checkbox"/> |
| 給水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                        | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 順方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                        | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 逆方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                        | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 エアバージ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                        | <input type="checkbox"/> |
| アルコールフラッシュ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                        | <input type="checkbox"/> |
| オゾン分解ファン   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                        | <input type="checkbox"/> |
| 排水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                        | <input type="checkbox"/> |
| 異常音、振動     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                        | <input type="checkbox"/> |
| 性能確認       |      |                                     |                                           |                          |
| オゾン水濃度     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度: 6.3 91.4 mg/L                         |                          |
| オゾンインジケータ  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                           |                          |
| 酸素発生       | 正常   | <input type="checkbox"/>            | 濃度: 91.4 % 流量: 0.82 L/min 圧力: 137~280 MPa |                          |
| 水漏れ確認      |      |                                     |                                           |                          |
| 装置外        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                        | <input type="checkbox"/> |
| 装置内        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                        | <input type="checkbox"/> |
| 清掃         |      |                                     |                                           |                          |
| 外装         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃                                        | <input type="checkbox"/> |
| 内部         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃                                        | <input type="checkbox"/> |
| 洗浄コネクタ     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                        | <input type="checkbox"/> |
| 洗浄チューブ     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                        | <input type="checkbox"/> |

| 交換部品     | 数量 | コメント |
|----------|----|------|
| 吸着筒      | 一式 |      |
| 吸湿筒      | 一式 |      |
| ドレン用フィルタ | 一個 |      |
| オゾン分解触媒  | 一個 |      |
|          |    |      |
|          |    |      |

2019年12月23日

署名

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。