

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成23年 11月 17日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	196
作業年月日	平成23年 11月 17日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	尾田内科胃腸科		TEL:	
所在地			担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成22年 11月 14日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ / 年 回数	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 5/3
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 風速 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

E:302 (1/8) (9/60)

装置情報	交換後運転回数: 1185	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 1059	殺菌+7h: 26
	リークチェック: 実施	自己洗浄: 2	7h-1単独: 438	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾンセンサー		☒	1			☐	
オゾン分解器		☒	1			☐	
酸素フロー		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者 作業者

