

保守点検・修理 報告書

管理 No. 110707

発行日 平成28年 7月 7日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100082
作業年月日	平成28年 7月 7日	作業時間:	1.2 Hr
顧客名	深水医院	TEL:	
所在地	熊本県水俣市大園町 1-4-5	担当	様
販売店	(株)熊本診療協力社	担当	様
納入年月日	平成22年 6月 29日	保証期間	内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハルス数 451
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

各部点検異常なし。
※最後の自己洗浄を必ずお願い致します。

装置 情報	交換後運転回数: 471	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 186	殺菌+7L: 285
	リークチェック: 0	自己洗浄: 60	7L単独: 1	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
7L用フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

28年 7月 7日

熊本県水俣市大園町1丁目4番5号
医療法人 深水医院

ご署名



修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

