

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成23年 9月 16日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100108	
作業年月日	平成23年 9月 16日		作業時間:	1.5 Hr	
顧客名	東病院		TEL:		
所在地			担当	様	
販売店	(株)熊本診療器械株式会社		担当	様	
納入年月日	平成22年 9月 9日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐				修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
異常履歴 7FL			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 639
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
各部点検 異常なし			

装置 情報	交換後運転回数:	90	更新(リセット)実施・未実施	殺菌:	9	殺菌+7L:	81
	リークチェック:	0	自己洗浄:	42	アルコール単独:	0	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
オゾン濃度計用フィルター		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		H23年 9月 16日	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		ご署名 中川 博文 印	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。			

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者	作業者
	

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成23年 9月16日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100108	
作業年月日	平成23年 9月16日		作業時間:	1.5 Hr	
顧客名	東病院		TEL:		
所在地			担当	様	
販売店	(株)熊本診療協力社		担当	様	
納入年月日	平成22年 9月9日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐				修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴 7FL

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 639
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

各部点検 異常ナシ

装置 情報	交換後運転回数： 90		更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	殺菌： 9	殺菌＋7L： 81
	リークチェック： 0		自己洗浄： 42	7L単独： 0	エア単独： 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
オゾン濃度計用スワッチ		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H23年 9月16日

ご署名

中川 博文

印

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

