

管理 No.

発行日 平成24年 4 月 11 日

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000			製造番号:	100032
作業年月日	平成24年 4 月 11 日			作業時間:	1 Hr
顧客名	宮城病院			TEL:	
所在地				担当	様
販売店				担当	様
納入年月日	平成22年 3 月 25 日	保証期間	内 □ 外 □	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	☐	年	回目
出張・引取	修 理 ☐	定期点検シール記入 ☒			
				修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

各部点検異常なし、
殺菌槽修了後の自己洗浄を実施願います。

不具合原因、作業内容

点検項目		結果
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライオン	正常 ☒	エアライオン 正常 ☒
アルコールライオン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 543
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライオン 正常 ☒
給水ライオン	正常 ☒	細管送水ライオン 正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライオン 正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 263	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 272	殺菌+7W: 201
	リークチェック: 3	自己洗浄: 25	7W単独: 1	エア単独: 4

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
濃度計		☒	1	コネクタ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
脱気スウェッチ		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H24年 4 月 11 日
ご署名 佐藤 幸富 印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

