

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成23年10月13日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100119
作業年月日	平成23年10月13日		作業時間:	Hr
顧客名	岡山中央病院		TEL:	
所在地			担当	様
販売店	(株)熊本診療協力社		担当	様
納入年月日	平成22年9月28日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シート記入	☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 684
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常なし。
自己洗浄後の水分を拭き取る様にして下さい。

装置 情報	交換後運転回数:	244	更新 (リセット) (実施)・未実施	殺菌:	1	殺菌+7L:	243
	リークチェック:	7	自己洗浄:	56	7L単独:	0	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
濃度計用フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H23年 10月 13日

ご署名

吉野 百枝

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

