

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 25 年 2 月 20 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100397
作業年月日	平成 25 年 2 月 20 日		作業時間:	1 Hr
顧客名	金武外科肛門科		TEL:	
所在地			担当	様
販売店	山下医科器械(株)		担当	様
納入年月日	平成 23 年 12 月 26 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 399
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
H25.2.20 定期保守実施。 各部点検異常なし。			

装置 情報	交換後運転回数:	558	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌:	22	殺菌+7L:	536
	リークチェック:	0	自己洗浄:	270	アルコール単独:	1	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
平成 25 年 2 月 20 日 代表者 金武外科肛門科 金 武 良 弘 ご署名 金 武 良 弘	

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津 5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者	作業者
	