

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成25年3月29日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100422	
作業年月日	平成25年3月29日		作業時間	1	Hr
顧客名	本里内科		TEL		
所在地			担当	様	
販売店			担当	様	
納入年月日	平成24年3月27日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 460
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.23 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					
導入時の条件で、今回の保守費用はサービス。次回より有償となります。					
次年度より 総合保守。					

装置 情報	交換後運転回数	271	更新(リセット)実施・未実施	殺菌	14	殺菌+アル	257
	リークチェック	46	自己洗浄	229	アルコール単独	0	エア単独

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	25年3月29日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	ご署名 本里内科 印
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者	作業者