

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年8月28日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100260
作業年月日	平成24年8月28日	作業時間:	1 Hr
顧客名	石垣病院	TEL:	0977-66-7557
所在地	大分県別府市奥相手1-4	担当	様
販売店	(株)入建メテソルライズ	担当	様
納入年月日	平成23年8月10日	保証期間	内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 4/5
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

定期保守点検実施

※ 導入時条件により、今回分の保守費用はサービス。次回より有償となります。

装置情報	交換後運転回数: 30 / 更新(リセット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌: 40	殺菌+7L: 261
	リークチェック: 298 自己洗浄: 205	7L単独: 0	エア単独: 161

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

24年8月28日

ご署名

綾部 美香

綾部 印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

河野

北村