

管理 No.

保守点検・修理 報告書

発行日 平成25年 8 月 7 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 30034
作業年月日	平成25年 8 月 7 日	作業時間: 2 Hr
顧客名	アリスケルビル71ニビル	TEL: 様
所在地		担当 様
販売店		担当 様
納入年月日	平成24年 12月 25日	保証期間 内 外 口 付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライオン	正常 ☒	エアライオン	正常 ☒
アルコールライオン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 432
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライオン	正常 ☒
給水ライオン	正常 ☒	細管送水ライオン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライオン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
各部位点検異常なし。			

装置情報	交換後運転回数: 1,685	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 1,490	殺菌+7L: 189			
	リークチェック: 0	自己洗浄: 178	7L単独: 2	エア単独: 2			
交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
不具合解除済		☒	1	排水パイプ		☒	1
排水パイプ		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
濃度計		☒	1			☐	
パイプ		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2013 年 8 月 7 日
ご署名 印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者 作業者

