

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25年 8 月 9 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100260	
作業年月日	平成25年 8 月 9 日		作業時間:	/ Hr	
顧客名	石垣病院		TEL:	0977-66-7557	
所在地	大分県別府市奥相寺 1-4		担当	様	
販売店	(株)人建メティオラライジング		担当	様	
納入年月日	平成23年 8 月 10 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修 理 ☐				修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 413
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☐ ヒビあり	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

定期保守点検実施、各部点検異常なし。
Ver. 0104 ⇒ Ver. 0107.

装置 情報	交換後運転回数: 335	更新 (リセット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌: 84	殺菌+アル: 552
	リークチェック: 625	自己洗浄: 423	アルコール単独: 0	エア単独: 506

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	洗浄エネ72-		☒	2
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

25年 8 月 9 日

ご署名 綾部 美香 綾部 印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者 作業者

河野

北村