

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25年8月29日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100279	
作業年月日	平成25年8月29日		作業時間:	/ Hr	
顧客名	福井クリニック		TEL:		
所在地			担当	様	
販売店	(株)アスラム		担当	様	
納入年月日	平成23年8月18日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年	回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 332
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

定期保守点検実施。各部点検異常なし。

Ver010-7

装置情報	交換後運転回数: 953	更新(リセット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌: 977	殺菌+7L: 794
	リークチェック: 433	自己洗浄: 372	7L単独: 11	エア単独: 6

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	洗浄コネクタ		☒	2
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒826-0047 福岡県田川市本郷14-29

福井クリニック
福井 ちなみ

ご署名

責任技術者

作業者

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

