

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 25 年 10 月 21 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100567
作業年月日	平成 25 年 10 月 21 日		作業時間:	/ Hr
顧客名	うれしの外科胃腸科クリニック		TEL:	
所在地			担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成 24 年 10 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴				
不具合原因、作業内容				
点検項目				
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	ハル数 477
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒	清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☐		正常 ☐	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項				
各部点検異常なし。				

装置 情報	交換後運転回数:	1138	更新(リット)実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌:	256	殺菌+7L:	383
	リークチェック:	359	自己洗浄:	291	7Lアルコール単独:	1	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	25 年 10 月 21 日 井の二郎 印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
 福岡県福岡市東区多の津 5-11-25
 TEL: 092-622-0055

責任技術者	作業者
	