

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

No. 131223

配布先	納入先	(株)新鋭工業福岡 福岡支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	長崎県大村市植松3丁目625-20			機番	001642
環営	ユーザー名	中牟田消化器内科クリニック 様（定期点検契約）			納入日	平成20年9月1日
	点検者	中澤一裕	作業時間	5.0Hr	受付日	平成25年12月27日
計	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成26年1月27日

修理依頼・苦情内容

オーバーホール


不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果

オゾン発生器をはじめ、性能が低下した部品を交換しました。

No1～5：センサ類、バルブ、スプリング ほか

No6～11：ポンプ、チューブ、切換弁、オゾン発生器

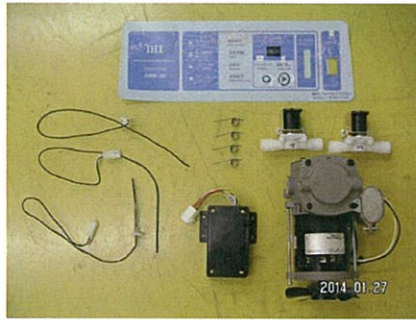

[2] 修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.52～0.58 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：94.8% 酸素流量：0.77 L/min 圧力：0.108～0.195 MPa（AC100V、60Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常

交換部品

承認	部品名称	数量	備考
	1 オゾンセンサー	1 個	
	2 水位レベルセンサー	3 本	LVL, LVH1, LVH2
	3 フタスプリング	4 個	
審査	4 エアコンプレッサー	1 台	
	5 給水バルブ	2 個	
	6～8 水ポンプ	3 台	P-1、P-2、P-3
作成	9 配管チューブ、パッキン	1 式	操作パネルシート含む
H26.1.28 中澤	10 PSA切換弁ASSY	1 式	
	11 オゾン発生器（オゾナイザー）	1 式	