

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20140512

発行日 平成 26年 5月 13日

☐お客様控 ☒メーカー控

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号:	300020
作業年月日	平成26年 5月 13日		作業時間:	Hr
顧客名	さくら病院 様		TEL:	096-286-8111
所在地	熊本県上益城郡益城町広崎1445番地15		担当	様
納入年月日	平成 25年 3月 21日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

消毒時給水異常 (E202) 頻発

不具合原因、作業内容

給水電磁弁の入口側に多量の砂などが詰まっていました。
これが抵抗になり、給水流量が低下して異常が発生しました。



点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 459
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

給水電磁弁を交換して復旧しました。

装置 情報	交換後運転回数: 111	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 246	消毒+7L: 676
	リークチェック: 233	自己洗浄: 354	7Lアルコール単独: 0	エア単独: 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
給水電磁弁; SV4		☒	1			☐	
給水電磁弁; SV5		☒	1			☐	
給水フィルター設置 (糸巻)		☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

平成 26年 5月 13日

引上げ修理につき不要です

ご署名

印

修理業者 株式会社 IHI シバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者

作業者

