

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 140725

配布先	納入先	株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	長崎県島原市有明町大三東戊 1365-1			機番	001417
環営	ユーザー名	くすのきクリニック 様			納入日	平成 19 年 8 月 22 日
防品	点検者	中澤一裕	作業時間	8 Hr	受付日	平成 26 年 7 月 2 日
	返送先	納入先と同じ			発送日	平成 26 年 7 月 25 日
計	3					

修理依頼・苦情内容

運転中に異音（キュルキュル）がする。

不具合原因（故障箇所）と処置


[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水ポンプが異音の原因で、これを交換して復旧しました。

このほかに性能が低下した部品を交換しました。

No. 1～3：定期交換部品

No. 4～11：ポンプ、水位センサー、エアコンプレッサー

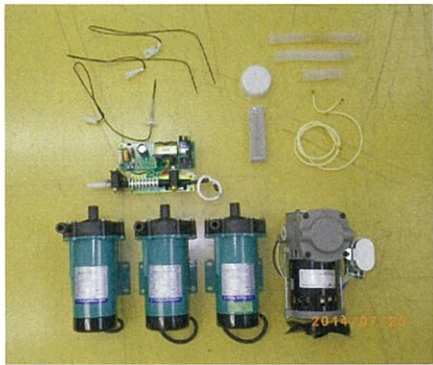

[2] 修理・点検内容

1. 運転プログラム Ver 8⇒10 書換え
12回運転するとフィルターランプが点滅して清掃時期をお知らせします。
2. オゾン水濃度測定：0.5 mg/L・・・正常
3. PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.5% 酸素流量：0.74L/min 圧力：0.110～0.187MPa
4. 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし

一以上一

承認



審査



作成

H26. 7. 25
中澤

交換部品

No.	部品名称	数量	備考
1～3	定期交換部品	1 式	
	吸着、吸湿筒、触媒、ドレンフィルタ		
4～6	水ポンプ	3 台	P-1、P-2、P-3
7	フィルター 1	1 個	
8	水位レベルセンサー	3 本	LVL、LVH、LVHH
9	配管チューブ、パッキン	1 式	水槽キャップ 含む
10	エアコンプレッサー	1 台	
11	オゾン発生装置	1 式	