

# 修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

No. 101013

|     |    |       |                    |      |             |
|-----|----|-------|--------------------|------|-------------|
| 配布先 | 客先 | 納入先   | 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店 殿 | 機種   | ONW-10      |
| 環営  | 防品 | 所在地   | 熊本県玉名郡横島町横島3387    | 機番   | 000719      |
|     |    | ユーザー名 | 安田内科医院 様           | 納入日  | 平成17年9月22日  |
|     |    | 点検者   | 中澤一裕               | 作業時間 |             |
|     |    | 返送先   | 納入先と同じ             | 受付日  | 平成22年9月7日   |
| 計   | 3  |       |                    | 発送日  | 平成22年10月12日 |

## 修理依頼・苦情内容


水漏れ、内部分解清掃、定期点検依頼

## 不具合原因（故障箇所）と処置予定

### [1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

給水電磁弁出口側の継手が緩んで水が漏れていたもので、増締めして復旧しました。  
オゾン水、排水系統を分解清掃し、配管類、水ポンプを交換しました。

写真1：交換済み部品

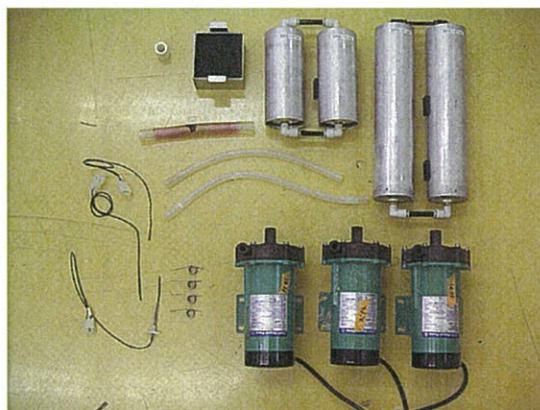

### [2] 修理・点検内容

- 部品交換：下表および写真1をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.49～0.63mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常  
酸素濃度：94.6% 酸素流量：0.83L/min 圧力：0.104～0.186MPa
- 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし

—以上—

## 交換部品

| 部品番号 | 部品名称              | 数量 | 備考            |
|------|-------------------|----|---------------|
|      | ドレンフィルター          | 1個 |               |
|      | 吸着筒、吸湿筒           | 1式 | SPS-10438     |
|      | オゾン水系統配管類         | 1式 |               |
|      | 水ポンプ（P-1、P-2、P-3） | 1式 |               |
|      | 水位レベルセンサー         | 1式 | LVL、LVH1、LVH2 |
|      | フタスプリング           | 4個 |               |

承認



審査



作成

H22.10.13

中澤