

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年2月18日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	300218	
作業年月日	平成27年2月18日		作業時間	1.0 Hr	
顧客名	よしかさ医院		TEL		
所在地			担当	様	
販売店			担当	様	
納入年月日	平成26年3月7日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
、定期点検実施、排水エラーを修正、排水フィルタ交換により改善。			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハルス数 208
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.77ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数	211	更新（リセット）実施・未実施	殺菌	27	殺菌+7L	165
	リークチェック	0	自己洗浄	153	アルコール単独	0	エア単独

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		☒	1	給水フィルタ		☒	1
オゾン水センサー		☒	1	排水フィルタ		☒	1
オゾン分解剤		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
排気フィルタ		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名 横溝 瑞司		印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者	作業者
	藤原