

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

No. 150406

納入先	(株)新鋭工業福岡 福岡支店 殿			機種	ONW-10
所在地	福岡県小郡市二タ1264-4			機番	001316
ユーザー名	黒岩外科 様			納入日	平成19年2月14日
点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	平成27年1月14日
返送先	納入先と同じ			発送日	平成27年3月27日

修理依頼・異常内容

インジケータ変色不良

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

酸素発生装置の性能が低下しており、これが原因でインジケータの変色が悪くなっていました。これらの部品を交換して復旧いたしました。次回は水ポンプの交換をご検討ください。

写真：交換部品一式



[2] 修理・点検内容

1. 運転プログラム Ver 8⇒10 書換え
12回運転するとフィルターランプが点滅して清掃時期をお知らせします。
2. オゾン水濃度測定：0.47～0.64 mg/L・・・正常
3. PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.7% 酸素流量：0.8L/min 圧力：0.102～0.191MPa
4. 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし
5. 運転カウンタ：536

交換部品

部品コード	部品名称	数量	備考
	吸着筒、吸湿筒	1式	
	ドレンフィルター	1個	
	オゾン分解触媒	1個	
	水位レベルセンサー	3本	
	配管チューブ、パッキン	1式	
	オゾンセンサー	1個	

承認



審査



作成

H27.4.6
中澤