

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年5月22日

|       |                                                                                 |                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                             | 製造番号: 3002A                                   |
| 作業年月日 | 平成27年5月22日                                                                      | 作業時間: 1.0 Hr                                  |
| 顧客名   | シネマクリエック 福岡                                                                     | TEL: 092-526-0055                             |
| 所在地   | 福岡市中央区南区 2-8-12                                                                 | 担当 様                                          |
| 販売店   | 新工業機械(株)福岡営業所                                                                   | 担当 水野 様                                       |
| 納入年月日 | 平成26年5月28日 保証期間 内口 外口                                                           | 付属品                                           |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> / 年 / 回目 | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                     | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |    |                                                                 |           |    |                                                 |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 578    |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.70 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             |           |    |                                                 |

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

定期点検実施 異常無し。尚、今回の点検は無償にて対応させていただきます。

|          |             |                                                    |         |           |
|----------|-------------|----------------------------------------------------|---------|-----------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 80 | 更新(リット) <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施 | 殺菌: 5   | 殺菌+7L: 86 |
|          | リークチェック: 0  | 自己洗浄: 55                                           | 7L単独: 0 | エア単独: 0   |

| 交換部品名称  | 部品コード | 交換                                  | 数量  | 交換部品名称 | 部品コード | 交換                       | 数量 |
|---------|-------|-------------------------------------|-----|--------|-------|--------------------------|----|
| オゾン水濃度計 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1.0 |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾンセンサー |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1.0 |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾン分解剤  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1.0 |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 排水栓     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1.0 |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 脱気フィルター |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1.0 |        |       | <input type="checkbox"/> |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 奥田 三任 印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店  
福岡県福岡市東区多の津5-11-25  
TEL: 092-622-0055

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       | 篠原  |