

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 150811

配布先	納入先	株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店 殿		機種	OED-1000
客先	顧客名	小林クリニック 様		機番	100066
環営	所在地	鹿児島県鹿屋市上谷町 5-31		納入日	平成 22 年 7 月 16 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 27 年 7 月 18 日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 27 年 8 月 1 日

修理依頼・不具合内容

・タッチパネルが起動しない

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検および作業内容

タッチパネルが起動しないことを確認しました。電源回路が故障しており、製造メーカーでも修理ができないため、タッチパネルごと交換いたしました。

写真：タッチパネル



〔2〕作業内容

- 1：タッチパネル～コントロール基板の配線チェック・・・正常
- 2：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 3：排水配管系統清掃

〔3〕性能確認

- 1：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.66ppm・・・正常
- 2：運転確認・・・正常

〔4〕工場出荷時の装置情報

交換後運転回数：3 殺菌：2、殺菌＋アルコール：1、リークチェック：1
自己洗浄：1、アルコール単独：0、エア単独：1

承認



審査



作成

H27. 8. 11

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	タッチパネル	1 台	No. 087374H007424

（株）IHI シバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528