

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年6月16日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100202
作業年月日	平成27年6月16日	作業時間: 1.0 Hr
顧客名	福岡市早良区南庄5-11-15	TEL: 092(251)3151
所在地	富士ハイムメディカル(株)	担当 高田 様
販売店	平成22年2月2日 保証期間 内口 外口	付属品
納入年月日	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
作業区分	出張・引取 修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒
酸素ライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒
給水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒
水位センサー	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒
清掃	正常	☒
トレイ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒

殺菌槽 LED	正常	☒
エアライン	正常	☒
オゾン水濃度計動作	正常	☒
排水栓、排水ライン	正常	☒
細管送水ライン	正常	☒
排気ライン	正常	☒
オゾン濃度	正常	☒
異常音、振動	正常	☒
電源コード	正常	☒
殺菌チューブ類	正常	☒

バルブ数 26

履歴 0.70 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

定期点検実施無し

装置情報	交換後運転回数: 1,539	更新(セット)実施・未実施	殺菌: 3,811	殺菌+7L: 3,811
	リークチェック: 3,553	自己洗浄: 1,291	7Lコル単独: 3,866	エア単独: 164

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		☒	1.0	オゾン水濃度計		☒	2.0
オゾンセンサー		☒	1.0	オゾンセンサー		☒	1.0
オゾン分解性媒		☒	1.0			☐	
脱気フィルター		☒	1.0			☐	
排水栓		☒	1.0			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

藤原