

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

No. 150901

配布先	納入先	株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店 殿		機種	OED-1000
客先	顧客名	山口胃腸科 様		機番	100138
環営	所在地	熊本県熊本市三郎1-14-23		納入日	平成22年9月4日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成27年7月24日
	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成27年8月31日
計	3				

修理依頼・不具合内容

- ・水漏れ（多量）
運転回数・・殺菌；8801、殺菌+アルコール；4105

不具合原因（故障箇所）と処置


[1] 点検および作業内容

機械内部のオゾン水が通るホースに亀裂が発生し、そこから水漏れしていました（写真1）
納入から4年以上で、運転回数が1万3千回近いことから経年劣化と思われます。
周辺のホース、チューブを全て交換して復旧しました。
今後は再発防止のため、早めの交換をご提案させていただきます。

写真1：水漏れ箇所

写真2：マニホールド周辺ホース

写真3：定期交換部品

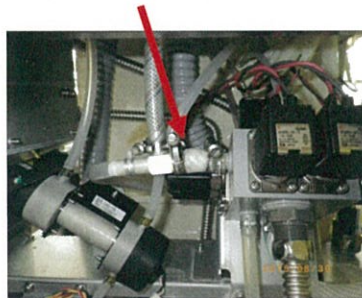

[2] 作業内容

- 1：部品交換・・写真と下表をご参照ください
- 2：保守点検

[3] 性能確認

- 1：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.66ppm・・正常
- 2：運転確認・・・・正常

承認



審査



作成

H27.9.1
中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	マニホールド周辺ホース	5本	
	定期交換部品	1式	
	オゾン水濃度計、オゾンガスセンサ		濃度計パルス：423
	排水栓、脱気フィルタ		

（株）IHIシバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528