

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年 7月16日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000				
作業年月日	平成27年 7月16日	製造番号	100032		
顧客名	岩城病院	作業時間	1.0 hr		
所在地		TEL			
販売店		担当	様		
納入年月日	平成 年 月 日	保証期間	内	外	様
作業区分	保守点検 ☒ 修理 ☐	総合点検	☐	年	回目
出張・引取	☐	定期点検シール記入	☒		
		修理表示貼付	☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴
異常なし

不具合原因、作業内容

点検項目		殺菌槽 LED	
フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ 酸素数 6.2
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ ppm 0.69
水位センサ	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒		
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
定期点検実施、異常なし

装置情報	交換後運転回数: 162	更新 (ロット) 実施・未実施	殺菌: 5/8	殺菌+7M: 5/15
	リークチェック: 6	自己洗浄: 18分	7Mコイル単独: 1	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		☒	1.0	7Mコイル		☒	2.0
オゾンセンサ		☒	1.0			☐	
オゾン水配管継手		☒	1.0			☐	
排水栓		☒	1.0			☐	
排気ライン		☒	1.0			☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。
1127年 7月 16日
ご署名 (佐藤 幸寛) 印

修理業者	株式会社 新鋭工業福岡	責任技術者	佐藤 幸寛
	福岡県福岡市東区多の津5-11-25	作業者	佐藤 幸寛
	TEL: 092-622-0055		