

田中クリニック 御中

点検確認書

株式会社 IHインバウラ
環境事業部

点検担当者:

藤原 誠一

点検年月日	2015年9月16日	機種名	ONW-10	製造機番	000723
設置場所				TEL	012-8313000
納入時期	2005年6月9日	使用回数	10,529	御対応者	

点検項目	点検結果	
スイッチ類		
電源釦	正常 ☒	交換 ☐
フィルタリセット釦	正常 ☒	交換 ☐
運転/停止釦	正常 ☒	交換 ☐
アルコー尔モード釦	正常 ☒	交換 ☐
ランプ類		
操作パネル	正常 ☒	交換 ☐
蛍光灯	正常 ☒	交換 ☐
洗浄動作		
フタロック	正常 ☒	調整 ☐
給水	正常 ☒	調整 ☐
細管洗浄 順方向	正常 ☒	調整 ☐
細管洗浄 逆方向	正常 ☒	調整 ☐
細管洗浄 エアパーシ	正常 ☒	調整 ☐
アルコー尔フラッシュ	正常 ☒	調整 ☐
オゾン分解ファン	正常 ☒	調整 ☐
排水	正常 ☒	調整 ☐
異常音、振動	正常 ☒	調整 ☐
性能確認		
オゾン水濃度	正常 ☒	濃度: 0.8 mg/L
オゾンインジケータ	正常 ☒	
酸素発生	正常 ☒	濃度: 98% 流量: 0.75 L/min 圧力: 129 ~ 220 MPa
水漏れ確認		
装置外	正常 ☒	調整 ☐
装置内	正常 ☒	調整 ☐
清掃		
外装	正常 ☒	清掃 ☐
内部	正常 ☒	清掃 ☐
洗浄コネクタ	正常 ☒	調整 ☐
洗浄チューブ	正常 ☒	調整 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式
吸湿筒	交換 ☐	一式
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個

コメント
点検実施、異常無し。
納入から10年経過。
更新を予定致す。
※来年8月16日修理対応終了。
敬請

F814-0033 福岡市早良区有田8丁目1-1
医療法人田中クリニック
田中 隆
TEL 092-831-3003

27年9月16日

ご署名 印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。