

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年11月27日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号	100561
作業年月日	平成27年11月28日	作業時間	2.0 Hr
顧客名	しば田クリニック様	TEL	0940-43-5222
所在地	福岡県福岡市中央区3-9-1	担当	様
販売店		担当	様
納入年月日	平成27年11月12日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

液晶パネル 暗転

不具合原因、作業内容

液晶パネル 交換

点検項目

フタロック	正常	☒
酸素ライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒
給水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒
水位センサー	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒
清掃	正常	☒
トレー	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒

殺菌槽 LED	正常	☒
エアライン	正常	☒
オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 657
排水栓、排水ライン	正常	☒
細管送水ライン	正常	☒
排気ライン	正常	☒
オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
異常音、振動	正常	☒
電源コード	正常	☒
殺菌チューブ類	正常	☒
	正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

定期点検実施、液晶パネル交換（無償交換）

装置 情報	交換後運転回数	1,161	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌	860	殺菌+アル	2,058
	リークチェック	0	自己洗浄	857	アルコール単独	22	エア単独

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		☒	2	洗浄ケーブル		☒	2
オゾンセンサ		☒	1	アルコールホース		☒	1
オゾン分解触媒		☒	1	液晶パネル		☒	1
脱気フィルタ		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 医療法人 しば田クリニック 印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

磯原