

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

05-19175

No. 151118

配布先	客先	納入先	株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店 殿	機種	OED-1000
	環営	顧客名	パールランド病院 様	機番	100778
	環品	所在地	鹿児島県鹿児島市犬迫町 2253	納入日	平成 25 年 6 月 27 日
		点検者	中澤一裕	作業時間	
		受付日	平成 27 年 10 月 15 日		
計	3	返送先	納入先と同じ	出荷日	平成 27 年 11 月 8 日

修理依頼・不具合内容

- ・ 運転終了後に水槽に水が残っている
- ・ 平成 27 年分 定期保守点検
- ・ 内部清掃

不具合原因（故障箇所）と処置


〔1〕点検および作業内容

毎回ではありませんが、「水ポンプ吸込口」から水が水槽に流れ込んで「排水栓」の周囲に多く残る（残水）状態を確認しました。
排水配管の位置を調整して改善いたしました。

写真：定期交換部品一式

水槽説明図

水ポンプ吸込口 排水栓周囲の水

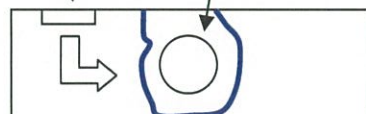

〔2〕作業内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.69ppm・・・正常
- 3：内部清掃
- 4：運転確認・・・・・・正常

承認



審査



作成

H27. 11. 18

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	定期交換部品	1 式	
	オゾン水濃度計、オゾンセンサー、排水栓		濃度計信号パルス：473
	オゾン分解触媒、濃度計用フィルタ、コネクタ		
	アルコールタンクキャップ	1 個	
	マニホールド周辺ホース、チューブ	1 式	
	オゾン水濃度計チューブ	1 式	

（株）IHI シバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528