

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年 8月 17日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000				製造番号:	100289
作業年月日	平成27年 8月 17日				作業時間:	1.0 hr
顧客名	ひめの胃腸内科クリニック				TEL:	092(554)5211
所在地	福岡市南区大橋2-27-4				担当	様
販売店					担当	様
納入年月日	平成23年 8月 28日	保証期間	内	口	外	付属品
作業区分	保守点検	☒	総合点検	☐	年	回目
出張・引取	修理	☐				定期点検シール記入 ☒
						修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコーラルライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ 396
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサ	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

定期点検実施 異常無し

装置情報	交換後運転回数:	366	更新 (セット) 実施	・未実施	殺菌:	293	殺菌+7ル:	1188
	リークチェック:	1244	自己洗浄:	642	7ルコル単独:	15	エア単独:	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		☒	1.0	排水栓、排水ライン		☒	2.0
オゾンセンサ		☒	1.0			☐	
オゾン濃度計		☒	1.0			☐	
排水栓		☒	1.0			☐	
排水ライン		☒	1.0			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

27年 8月 17日
ひめの胃腸内科クリニック

院長 姫野 祐一郎

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

姫野 祐一郎