

イサモヒクニク御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ  
環境事業部

点検担当者: 藤原 誠一

|       |                     |      |        |      |          |
|-------|---------------------|------|--------|------|----------|
| 点検年月日 | 2018年 1月 19日        | 機種名  | ONW-10 | 製造機番 | 001119   |
| 設置場所  | 福岡市東区奈多1-10-10サンプラザ | TEL  |        |      | 607-2385 |
| 納入時期  | 2018年 8月 日          | 使用回数 | 2,507  | 御対応者 | 渡辺様      |

| 点検項目         | 点検結果 |                                     |  |  |
|--------------|------|-------------------------------------|--|--|
| <b>スイッチ類</b> |      |                                     |  |  |
| 電源釦          | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                       | <input type="checkbox"/>                             |
| フィルタリセット釦    | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                       | <input type="checkbox"/>                             |
| 運転/停止釦       | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                       | <input type="checkbox"/>                             |
| アルコールモード釦    | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                       | <input type="checkbox"/>                             |
| <b>ランプ類</b>  |      |                                     |  |  |
| 操作パネル        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                       | <input type="checkbox"/>                             |
| 蛍光灯          | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                       | <input type="checkbox"/>                             |
| <b>洗浄動作</b>  |      |                                     |  |  |
| フタロック        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                       | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 給水           | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                       | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 順方向     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                       | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 逆方向     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                       | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 エアパージ   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                       | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| アルコールフラッシュ   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                       | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| オゾン分解ファン     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                       | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 排水           | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                       | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 異常音、振動       | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                       | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| <b>性能確認</b>  |      |                                     |  |  |
| オゾン水濃度       | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度: 0.8 mg/L                             |  |
| オゾンインジケータ    | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> |  |  |
| 酸素発生         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度: 96% 流量: 0.75 L/min 圧力: 1.9 ~ 2.2 MPa |  |
| <b>水漏れ確認</b> |      |                                     |  |  |
| 装置外          | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                       | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 装置内          | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                       | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| <b>清掃</b>    |      |                                     |  |  |
| 外装           | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃                                       | <input type="checkbox"/>                             |
| 内部           | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃                                       | <input type="checkbox"/>                             |
| 洗浄コネクタ       | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                       | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 洗浄チューブ       | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                       | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |

| 交換部品     | 数量 | コメント   |
|----------|----|--|
| 吸着筒      | 一式 | 納入より10年経過<br>今年8月の修理対応<br>終了致します。<br>更新をご提案致します。 |
| 吸湿筒      | 一式 |  |
| ドレン用フィルタ | 一個 |  |
| オゾン分解触媒  | 一個 |  |
|          |    | 年 月 日<br>署名 楠本 宏記                                |

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。