

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年1月26日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号	100070
作業年月日	平成28年1月26日	作業時間	1.0 Hr
顧客名	ピーエスクリニック様	TEL	092-283-7777
所在地	博多区店屋町6-18 727人ス7238F	担当	様
販売店	(株) 渡辺商会	担当	信國 様
納入年月日	平成22年9月3日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 380
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.77 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

定期点検実施、異常無し

装置 情報	交換後運転回数	72	更新（リセット）実施・未実施	殺菌	9	殺菌+7L	65
	リークチェック	0	自己洗浄	29	7L単独	0	エア単独

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		☒	1.0	洗浄ボック		☒	2.0
オゾンセンサー		☒	1.0	ターボボス		☒	1.0
オゾン分解触媒		☒	1.0			☐	
脱気フラグ		☒	1.0			☐	
排水栓		☒	1.0			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成 年 月 日
医療法人 栢生会 ピーエスクリニック

ご署名

印

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

篠原