

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年3月5日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	300239	
作業年月日	平成28年3月15日		作業時間:	1.0	Hr
顧客名	及川病院		TEL:		
所在地			担当	様	
販売店			担当	様	
納入年月日	平成26年9月3日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☒	
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付	☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルス数 505
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

次回以降メンテナンス料有償 ¥70,000—

装置情報	交換後運転回数: 61	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 15	殺菌+7L: 111
	リークチェック: 122	自己洗浄: 33	7Lアルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		☒	1	7Lコネクタ		☒	2
オゾンセンサー		☒	1			☐	
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
排気パイプ		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 医療法人にゆうわ会 及川病院

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者	作業者
	藤原