

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

05-20678

No. 160617

配布先	納入先	(株)新鋭工業福岡 福岡支店 殿		機種	OED-1000S
客先	顧客名	安元内科胃腸クリニック 様		機番	300316
環営	所在地	福岡県福岡市博多区吉塚本町 13-27		納入日	平成 26 年 9 月 24 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 28 年 5 月
	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 28 年 6 月 16 日
計	3				

修理依頼・不具合内容

酸素圧力スイッチ異常 (E:113)


※4/27～5/11 まで 40 回発生している

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検および作業内容

工場で運転確認したところ、不具合が再現しました
酸素ガスを供給しても、圧力スイッチからの信号が不安定な状態で「酸素を供給していない」と画面表示されました。
この部品とコントロール基板を交換して復旧いたしました。

写真：交換部品一式

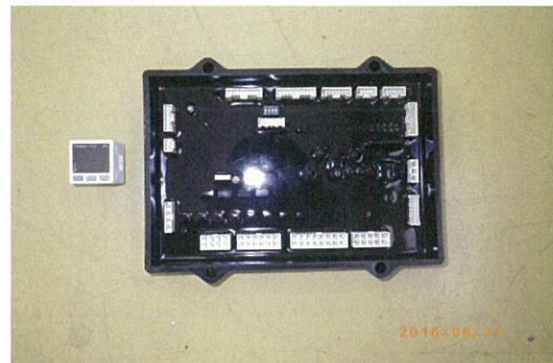

[2] 作業内容

- 1：酸素圧力スイッチ～コントロール基板の配線チェック・・・正常
- 2：部品交換・・・写真と下表をご参照ください

[3] 性能確認

- 1：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.67ppm・・・正常
- 2：運転確認・・・正常

[4] 装置情報

交換後運転回数：263 消毒：61、消毒＋アルコール：488、リークチェック：437
自己洗浄：280、アルコール単独：1、エア単独：0

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	酸素圧力スイッチ	1 台	
	コントロール基板	1 枚	

承認

安
76.6.17
田

審査

中
76.6.17
澤

作成

H28. 6. 17

中澤

(株) I H I シバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 1 7 0 - 6 TEL:086-944-6528