

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100402
作業年月日	平成 29年 1月 24日		作業時間： 1.0 Hr
顧客名	田中宏明内科胃腸科クリニック 様		TEL： 092-864-0007
所在地	福岡県福岡市城南区片江4丁目1-6		ご担当 様
販売店	富士フィルムメディカル 福岡		ご担当 様
納入年月日	平成 23年 12月 15日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
異常無			
不具合原因、作業内容			
異常無			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 532
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
☐			
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
点検後異常無			

装置情報	交換後運転回数： 1166	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 3058	殺菌/消毒+7L： 27.7
	リークチェック： 5393	自己洗浄： 1416	7Lアルコール単独： 12	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	11427		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	73516		☒	1

お客様ご確認署名欄	年 29 月 24 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	田中宏明
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	印
ご署名	

修理業者	株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店	責任技術者	作業者
	福岡県福岡市東区多の津5-11-25		
	TEL：092-622-0055		