

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20160110
発行日：平成 29年 1月 10 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300123
作業年月日	平成 29 年 1 月 10 日		作業時間： Hr
顧客名	中津胃腸病院 様		TEL： 0979-24-1632
所在地	大分県中津市大字永添510		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	平成 26 年 1 月 30 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品 なし
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 3 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・ <u>引取</u>	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
保守点検および内部清掃依頼			
不具合原因、作業内容			
運転プログラムをVer. 0204/T02BVからVer. 0207/T02BVにバージョンアップしました。			
【変更点】濃度計ウォーミングアップの終了条件を見直しました。条件が整えば通電直後に運転できます。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 452
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☐
トレー	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果 (<u>完了</u>)、暫定処理など、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数：1354	更新 (リット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒：4575	殺菌/消毒+7L：180
	リークチェック：1236	自己洗浄：954	7Lアルコール単独：1023	エア単独：40

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1 式
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	印
工場点検につき不要です	

修理業者 株式会社 IHI シバウラ
岡山県岡山市東区西大寺新地 1 7 0 - 6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者
	