

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 2019年 8月 6日

ウオッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2019 年 7 月 29 日 作業時間： Hr
顧客名	佐久間デンタルクリニック 様 TEL： 024-555-6857
所在地	福島県福島市森合字屋敷中15-1 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2016 年 5 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号： 100105	運転回数：	運転回数リセット： ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー16 槽内温度低下			
原因			
・プログラム内パラメーター値の不具合			
処置、作業内容			
・プログラムバージョンアップ、パラメーターの変更			
・各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 8 月 21 日

ご署名 佐久間 隆章 障



修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環PJ '19/07/29 富田	環PJ '19/07/29 桐野

ICW 扉開閉ワイヤー点検実施報告書

お客様 佐久間デンタルクリニック 御中 製造番号 100105

住所 福島県福島市森合字屋敷中15-1

点検日 2019年 7月 29日

点検時間 ~ 点検者 桐野

- ☒ 扉開閉ラインの交換
- ☒ エッジガードの追加
- ☒ 樹脂エルボの交換
- ☒ 最新プログラムへの書き換え
- ☒ 洗剤遅延検知時間の変更(60秒)
- ☒ 防水シートの追加
- ☒ 凝縮エア抜きパネルの交換
- ☒ U字金具によるシリコンシートの固定
- ☒ 漏洩センサー両面テープの交換
- ☒ 排水ポンプコンデンサーの端子保護

特記事項

お客様ご確認ご署名欄

2019年 8 月 21 日

ご署名 佐久間 隆章



本作業にて知りえた個人情報は、他の目的では使用いたしません。

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部
岡山県岡山市東区西大寺170-6
TEL (086)944-6528