

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号 05-24070 No. 170512

納入先	新鋭工業 株式会社 福岡支店 殿		機種	ONW-10
所在地	福岡県田川郡添田町大字庄 890-5		機番	001647
ユーザー名	中山医院 様		納入日	平成 20 年 9 月 18 日
点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 29 年 3 月 7 日
返送先	納入先と同じ		発送日	平成 29 年 4 月 26 日

不具合内容

インジケータ変色不良

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果

オゾン発生装置の上流に酸素発生装置（PSA）がありますが、酸素濃度 規定値90%に対し80%と下がっておりまして。これが原因でオゾンインジケータの変色が「要点検」になりました。酸素発生装置（PSA）を構成する部品を交換して復旧いたしました。

No. 1～4：交換部品一式



[2] 修理・点検内容

- 部品交換・・・下表と写真をご参照ください
- オゾン水濃度測定：0.46～0.58 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検
酸素濃度：93.4% 酸素流量：0.79L/min 圧力：0.092～0.171MPa
- 運転確認 異常なし。
- インジケータ変色 異常なし
- 運転カウンタ：630

承認



審査



作成

H29. 5. 12
中澤

交換部品

No.	部品名称	数量	備考
1～3	定期交換部品（PSA 部品） 吸着筒、吸湿筒、ドレンフィルタ、分解触媒	1 式	
4	エアコンプレッサー	1 台	