

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

05-19210

No. 151215

配布先	納入先	(株)新鋭工業福岡 福岡支店 殿			機種	OED-1000
客先	1	顧客名			機番	100202
環営	1	所在地			納入日	平成23年2月8日
環品	1	点検者			受付日	平成27年11月17日
		作業時間			出荷日	平成27年12月10日
計	3	返送先				

修理依頼・不具合内容

・タッチパネルが起動しない


不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検および作業内容

工場で運転確認したところ、正常に起動しました。しかし過去の事例から故障の前兆と判断してタッチパネルおよび関連するコントロール基板を交換しました。

不具合品を引き続き起動確認していますが、12/15現在で起動不良は再現しない状態です。

写真：交換部品一式

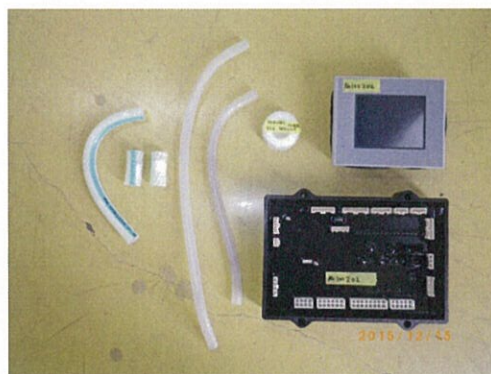

[2] 作業内容

- 1：タッチパネル～コントロール基板の配線チェック・・・正常
- 2：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 3：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.70ppm・・・正常
- 4：運転確認・・・正常
- 5：出荷時の運転情報・・・交換後運転回数：1188 殺菌：4131 殺菌＋アルコール：4079
リ-クェック：4015 自己洗浄：1401 アル単独：418 イア単独：436

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	タッチパネル	1台	No. 087374H030882
	アルコールタンクキャップ	1個	
	コントロール基板	1枚	
	マニホールド周辺ホース	1式	

承認



審査



作成

H27. 12. 15

中澤

(株) I H I シンパウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528