

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

No. 140710

配布先	納入先	株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店 殿		機種	OED-1000
客先	顧客名	いまだ内科・消化器科 様		機番	100105
環営	所在地	宮崎県延岡市塩浜町2-1932-1		納入日	平成22年10月14日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成26年6月17日
	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成26年7月8日
計	3				

修理依頼・不具合内容

運転終了後、水槽内に水が残っている

経緯：5/27・・現地にて残水の状況を確認しました。

6/13・・給水側に減圧弁設置（新鋭工業福岡殿実施）

6/16・・工場点検のため引上げ


不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検および作業内容

毎回ではありませんが、「水ポンプ吸込口」から水が水槽に流れ込んで「排水栓」の周囲に多く残る（残水）状態を確認しました。
この現象に関連する部品を一式交換し、排水配管の位置を調整したところ残水の状態が改善しました。

水槽説明図

水ポンプ吸込口 排水栓周囲の水

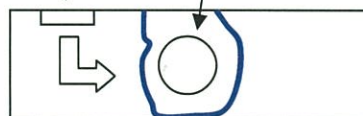

写真：交換部品一式



[2] 性能測定

1：オゾン水濃度測定（規定値0.7±0.2ppm）：0.68ppm・・正常

2：運転確認・・・・正常（濃度計パルス：281）

[3] 出荷時の装置情報

運転プログラム：Ver0107/T01A 前回定期点検日：2013年9月4日

交換後運転回数：458

殺菌：267 殺菌+アルコール：1693 リークチェック：66 自己洗浄：686 アルコール単独：8 I7単独：0

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	給水電磁弁（SV4、SV5）	2個	
	排水栓 ASSY	1式	
	オゾン水濃度計用フィルタ	1枚	

承認

審査

作成

H26.7.10

中澤

（株）IHIシバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528