

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

05-20730

No. 161004

配布先	納入先	(株)新鋭工業福岡 福岡支店 殿		機種	OED-1000
客先	顧客名	なもと内科・胃腸クリニック 様		機番	100202
環営	所在地	福岡県福岡市早良区南庄 5-11-15		納入日	平成23年2月8日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成28年9月1日
	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成28年9月28日
計	3				

修理依頼・不具合内容

オゾン水生成異常 (E:202)

8/31・・・4回目の運転(10時40分、11時1分)で発生し、その後2回運転できた

不具合原因(故障箇所)と処置

[1] オゾン水生成異常につきまして

オゾン水生成に規定時間以上かかった場合に自動停止します。

[2] 点検結果

工場で運転確認したところ、故障や問題はありませんでした。

殺菌履歴を調べると、8/31のオゾン水濃度は他の日に比べて0.01~0.02ppm低い状態でした。

酸素ガス量を調整してオゾン発生量を多めに調整しましたので様子を見てくださいますようお願い致します。

[3] 作業内容

1:酸素流量調整:0.80→0.92L/min

2:オゾン水濃度測定(規定値 0.7 ± 0.2 ppm):0.68ppm・・・正常

3:運転確認・・・正常

4:出荷時の運転情報・・・交換後運転回数:108 殺菌:5420 殺菌+アルコール:4953

リークチェック:4810 自己洗浄:1604 アル単独:592 エア単独:876

承認



審査



作成

H28.10.4

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考

(株) IHI シバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528