

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

05-24171

No. 170703

配 布 先	納 入 先	(株)新鋭工業福岡 福岡支店 殿			機 種	O E D－１０００	
客先	1	顧 客 名			なもと内科・胃腸クリニック 様	機 番	１００２０２
環営	1						
環品	1	所 在 地			福 岡 県 福 岡 市 早 良 区 南 庄 5-11-15	納 入 日	平成 23 年 2 月 8 日
		点 検 者		中澤一裕	作業時間	受 付 日	平成 29 年 4 月 13 日
		返 送 先			納入先と同じ	出 荷 日	平成 29 年 6 月 21 日
計	3						

修理依頼・不具合内容

オゾン水生成異常（E:207）が不定期に発生する
3/28・・・3回発生。 4/8・・・2回発生 4/11・・・2回発生

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果

条件を振って運転確認しましたが、異常は再現しませんでした。
ガスラインを分解点検したところ、オゾン水を作る部品（写真1）に不具合がありましたので、これが原因と推察し、酸素ガス電磁弁と合わせて交換しました。

写真1：アスピレータ



写真2：交換部品一式



[2] 作業内容

- 1：分解点検および部品交換
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.68ppm・・・正常
- 3：運転確認・・・正常
- 4：出荷時の運転情報・・・交換後運転回数：74 殺菌：6455 殺菌+アルコール：5596
リークチェック：5414 自己洗浄：1750 アル単独：691 エア単独：1452

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	アスピレータ	2個	
	マニホールド周辺チューブ	1式	
	酸素ガス電磁弁	2個	

承認



審査



作成

H29.7.3

中澤

(株) IHI シバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528