

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

05-24360

No. 170803

配布先	納入先	(株)新鋭工業福岡 福岡支店 殿			機種	OED-1000S
客先	顧客名	野口クリニック 様			機番	300234
環営	所在地	鹿児島県鹿児島市中央町 36-12			納入日	平成 26 年 3 月 26 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	平成 29 年 7 月 10 日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成 29 年 8 月 1 日
計	3					

修理依頼・不具合内容

異臭（焦げた臭い）


不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果

分解点検したところ、直流電源が故障しておりました。
電源に異物や水がかかった形跡は無く、部品の単発故障と思われますが、メーカーに送り調査いたします。この電源に関連する電気部品を念のために交換いたしました。

写真1：交換部品一式

直流電源

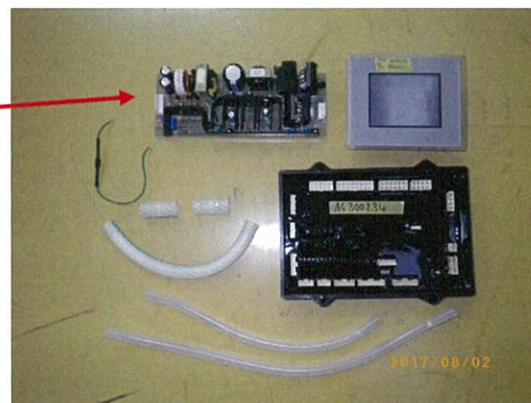

[2] 作業内容

- 1：分解点検および部品交換
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.67ppm・・・正常
- 3：運転確認・・・正常
- 4：出荷時の運転情報・・・交換後運転回数：251 殺菌：1557 殺菌+アルコール：889
リークチェック：2459 自己洗浄：293 アル単独：65 エア単独：0

承認



審査



作成

H29. 8. 3

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	直流電源	1 個	
	コントロール基板	1 枚	
	タッチパネル（バリスタ含む）	1 式	白黒型→カラー型
	マニホールド周辺チューブ	1 式	

(株) I H I シパウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 1 7 0 - 6 TEL:086-944-6528