

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 170418

配布先	納入先	(株)新鋭工業福岡 福岡支店 殿		機種	OED-1000S
客先	1	顧客名		機番	300838
環営	1	所在地		納入日	平成28年6月28日
環品	1	点検者		受付日	平成29年3月10日
		中澤一裕	作業時間	出荷日	平成29年4月11日
計	3	返送先			
		納入先と同じ			

修理依頼・不具合内容


3/1: 3回運転し、正常に終了した
 3/2: 「停電」異常(E:403)が3回発生したあと、1回運転し、正常終了した
 3/3: 1回運転し、正常に終了した

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検および作業内容

工場で運転確認したところ、異常は再現しませんでした。
 このため、停電異常に関係する部品を交換いたしました。これで様子を見て
 くださいますようお願いいたします。

写真：交換部品一式

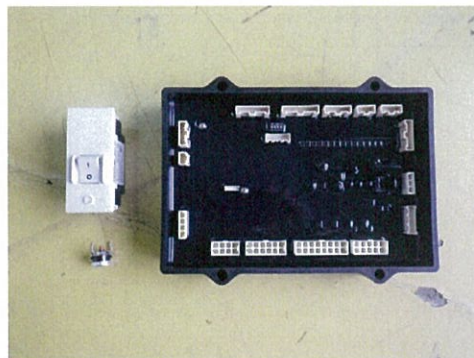

[2] 作業内容

- 1: 配線チェック・・・正常
- 2: 絶縁抵抗・・・・・・2000MΩ以上 正常
- 3: 部品交換・・写真と下表をご参照ください

[3] 性能確認

- 1: オゾン水濃度測定（規定値0.7±0.2ppm）: 0.69ppm・・・正常
- 2: 運転確認・・・・・・正常

[4] 装置情報

交換後運転回数: 260 消毒: 149、消毒+アルコール: 113、リークチェック: 0
 自己洗浄: 1、アルコール単独: 65、エア単独: 122

承認



審査



作成

H29. 4. 18

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	コントロール基板	1枚	
	サーモスタット	1個	
	ブレーカ	1個	

(株) IHI シバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528