

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20170207
発行日：平成 29年 2月 7日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300237
作業年月日	平成 29 年 2 月 6 日		作業時間： Hr
顧客名	生駒外科 様		TEL： 0993-22-3059
所在地	鹿児島県指宿市湊2-23-20		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	平成 26 年 3 月 27 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☒		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
オゾン水生成異常修理 および 保守点検			
不具合原因、作業内容			
オゾン発生装置に水が逆流して性能低下しておりました。			
内部乾燥して復旧いたしました。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 367
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数：1803 → 4 更新 (リセット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒：3225	殺菌/消毒+7L：1441
	リークチェック：793	自己洗浄： 44	アルコール単独： 5
		エア単独： 2	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	コントローラ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1 本

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	工場点検により不要です
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	印

修理業者 株式会社 IHI シバウラ
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者