

保守点検・修理 報告書

管理 No.

20180115

発行日：平成 30年 1月 15 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100780
作業年月日	平成 29 年 12 月 30 日	作業時間： Hr
顧客名	医療法人碧仁会 井ノ上病院 様	TEL： 0994-42-5275
所在地	鹿児島県鹿屋市王子町3980-1	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	平成 25 年 5 月 23 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品 なし
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・ <u>引取</u>	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・酸素ガスが切れてもブザーが鳴らない			
・各部清掃			
不具合原因、作業内容			
運転開始時や運転中に酸素ガスの供給をストップして確認しましたが異常ありませんでした。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パル数 328
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果 (<u>完了</u>)、暫定処理など、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数： 903	更新 (リセット) 実施・ <u>未実施</u>	殺菌/消毒： 4685	殺菌/消毒+アル： 1779
	リークチェック： 6464	自己洗浄： 901	アルコール単独： 104	エア単独： 1666

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ；水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ；チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐		タッチパネル		☒	1
オゾンセンサー		☐		マニホールド周辺チューブ		☒	1

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
工場点検につき不要です	
ご署名	印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シバウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者